


PAID

Vive sin límites

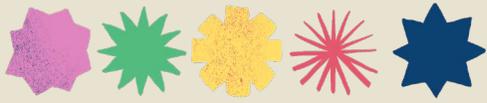

Plato adaptado



Este producto de apoyo te ayudará a

Comer con una sola mano con la facilidad de poder empujar la comida con el borde del plato

Instrucciones de fabricación

Materiales



Tubo de PVC de 6 pulgadas o más dependiendo del tamaño del plato

1 tubo corto



Pegante o soldadura para PVC

1 tarro pequeño

Abrazadera plástica de 1/2 pulgada de un ala



3 unidades

Tornillo estufa de 3/16 de pulgada



3 unidades

Tuercas de seguridad de 3/16 de pulgada



3 unidades

Taladro y broca de 3/16 de pulgada




1 unidad

Sierra o segueta

1 unidad



Plano

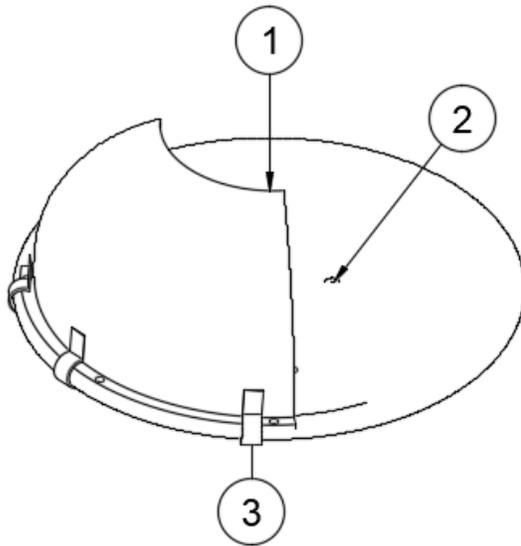

Lista de piezas		
Número de piezas	Nombre	Cantidad
1	Soporte	1
2	Plato	1
3	Abrazaderas	3



Paso 1

Corta el tubo de PVC con una sierra o segueta para obtener un soporte para plato con una altura de aproximadamente 50 milímetros (5 centímetros), después, corta el tubo para permitir la apertura del soporte.



Paso 2

Con las abrazaderas, mide 3 puntos para perforar el PVC de manera que estas tengan suficiente espacio para sostener el plato por debajo, después, usa el taladro para hacer estas perforaciones y usa la soldadura de PVC para pegar las abrazaderas y finalmente ajustarlas usando los tornillos y las tuercas de seguridad como puedes observar en la imagen.



Paso 3

Después de dejar secar la soldadura 24 horas, ubica el soporte sobre un plato utilizando las abrazaderas, puedes hacer soportes de diferentes tamaños utilizando diferentes tubos de PVC.

Instrucciones de uso

Paso 1

Ubica el soporte sobre un plato utilizando las abrazaderas, estas permiten un ajuste a varios tamaños de plato, sin embargo, intenta no abrir demasiado el soporte porque se puede romper el plato

Paso 2

Si el soporte es muy grande o muy pequeño intenta cambiar el plato o utilizar un soporte de otro tamaño.

Paso 3

Arrastra la comida hasta el borde del soporte para ubicarla encima de los cubiertos.

Paso 4

Limpia el soporte con agua y jabon para platos despues de cada uso o con un paño con agua y jabon.

Proveedores

Los materiales para construir este producto de apoyo los puedes conseguir en ferreterías y en internet.

PAID

Vive sin límites

Somos un equipo interdisciplinario que desarrolla productos de apoyo para mejorar la calidad de vida de las Personas con Discapacidad a través de procesos educativos en 10 municipios del departamento de Antioquia.

El diseño de los productos de apoyo se realizó de manera conjunta con las personas con Discapacidad, mediante una metodología de Rehabilitación Basada en Comunidad. Esta iniciativa fue liderada por la Universidad EIA, El Comité de Rehabilitación de Antioquia y Whee.