


PAID

Vive sin límites



Telar adaptado

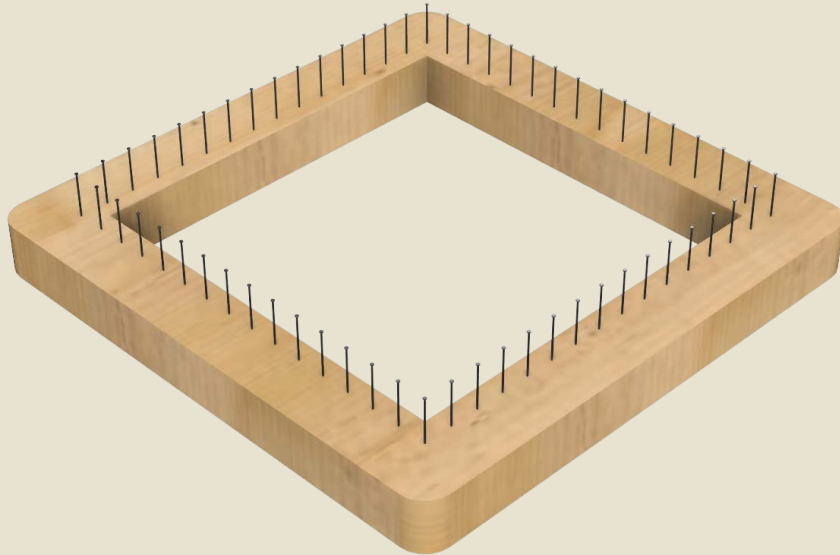

Este producto de apoyo te ayudará a

Hacer tejidos en un telar que se adhiere a superficies.

Instrucciones de fabricación

Materiales



Madera MDF de 9 milímetros de grosor

1 lámina
1 metro por 1 metro



Montaje PU

1 tarro

Pistola calafateo



1 unidad

Tinta para madera



1 tarro pequeño

Sellante para madera



1 tarro pequeño

Puntilla de acero liso de 1 pulgada de largo con cabeza



61 unidades



Chupa, o ventosa, de plástico de 2 centímetros de diámetro

4 unidades



Martillo

1 unidad



Taladro


1 unidad




Broca de 5/16 de pulgada

1 unidad

Plano

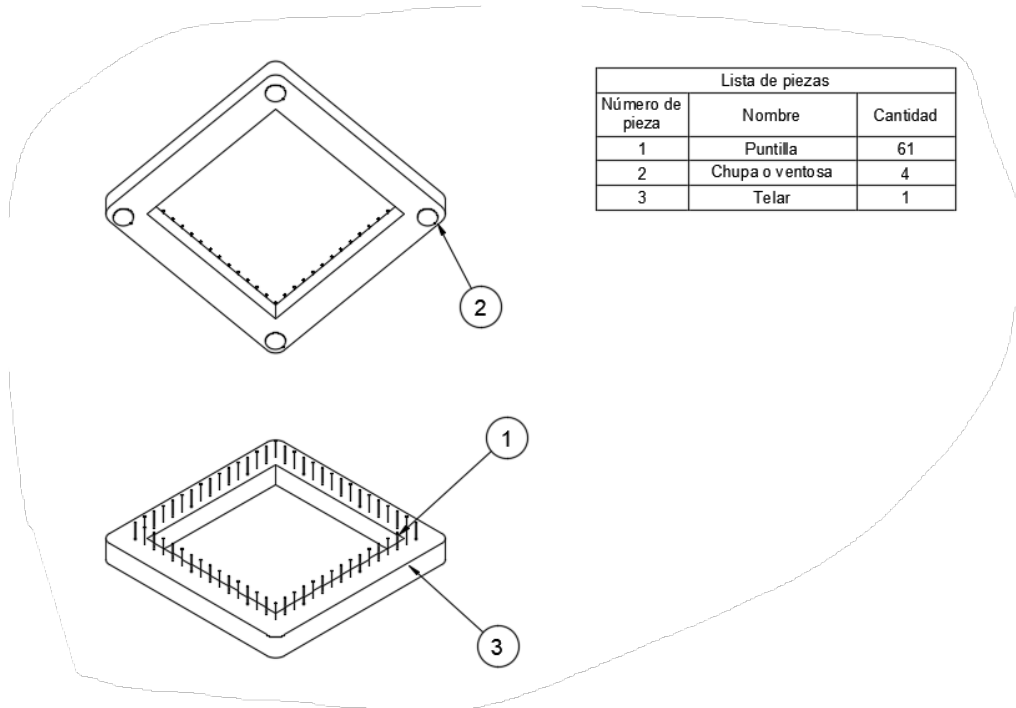

Paso 1

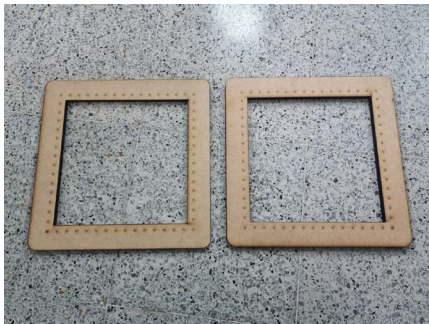

Corta, preferiblemente a láser, la madera MDF siguiendo el diseño del modelo que encuentras en este [vínculo](#). Debes tener dos cortes de madera.

Paso 2



Tinta y barniza las piezas cortadas.

Paso 3




Pega las dos láminas de MDF con montaje PU, y deja secar.
Esta parte será la base de tu telar.

Paso 4



Has cuatro huecos, en cada esquina, para poner las chupas o ventosas y pégalas en los huecos realizados anteriormente usando montaje PU.

Paso 5

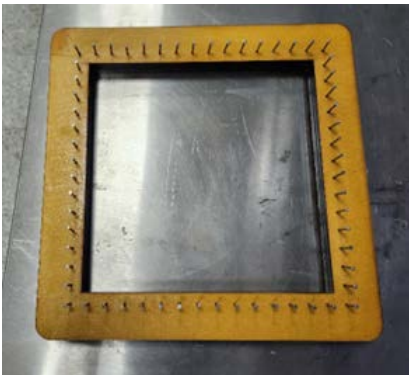

Clava las puntillas siguiendo las medidas del plano.
Deben estar separadas 16 milímetros entre ellas para quedar como la imagen de la izquierda.

Instrucciones de uso

Paso 1

Utiliza las chupas para fijar el telar a una superficie, por ejemplo, vidrio.

Paso 2

Toma hilo o cordel.

Paso 3

Entrelaza el hilo, o cordel, por las puntillas para crear el patrón que desees.

Paso 4

Limpia con un paño medio húmedo con agua.

Proveedores

Los materiales para construir este producto de apoyo los puedes conseguir en tiendas de madera, ferreterías, y en internet.

PAID

Vive sin límites

Somos un equipo interdisciplinario que desarrolla productos de apoyo para mejorar la calidad de vida de las Personas con Discapacidad a través de procesos educativos en 10 municipios del departamento de Antioquia.

El diseño de los productos de apoyo se realizó de manera conjunta con las personas con Discapacidad, mediante una metodología de Rehabilitación Basada en Comunidad. Esta iniciativa fue liderada por la Universidad EIA, El Comité de Rehabilitación de Antioquia y Whee.