

# PAID

Vive sin límites



## Cultivo adaptado



# Este producto de apoyo te ayudará a

Cultivar cuidando de tu postura corporal ya que lo podrás hacer sentado o parado.

## Instrucciones de fabricación

### Materiales



Tubería de acero inoxidable rectangular

10 metros de 50 milímetros por 30 milímetros y 1 milímetro de espesor



Sierra circular

1 unidad

Materas de plástico




4 unidades de 1000 milímetros de largo por 400 milímetros de ancho.

Tornillo de ensamble



8 tornillos de 2 pulgadas

Plano

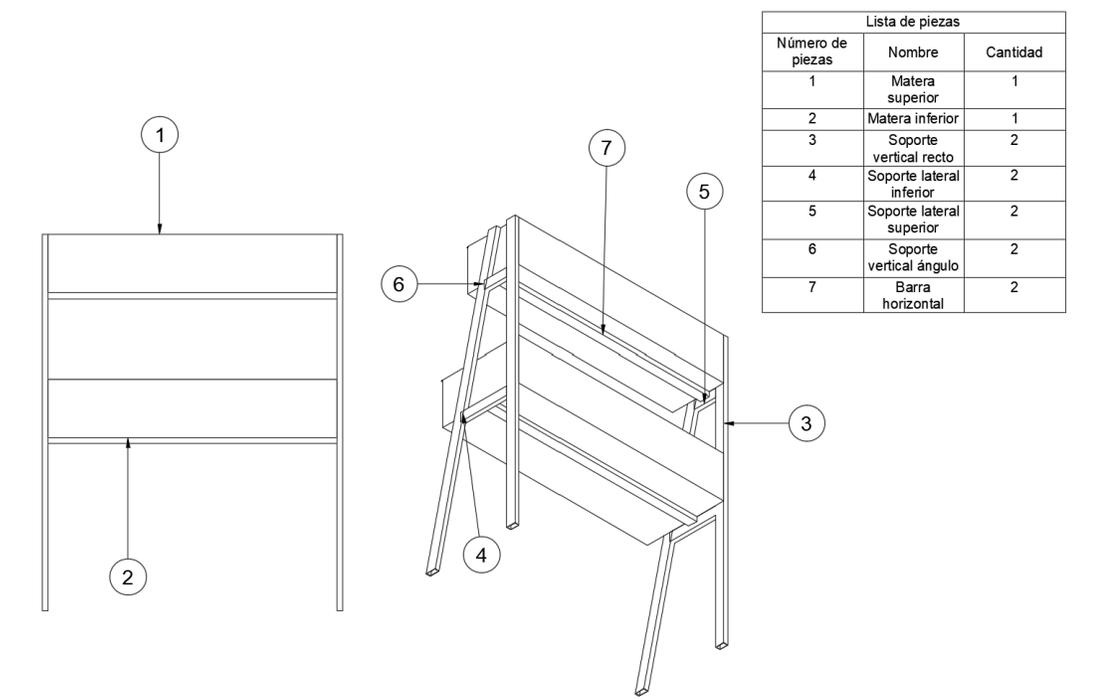


Paso 1

Corta, con la sierra circular las 2 barras horizontales, cada una de 1000 milímetros, como se muestra en la imagen de la izquierda.



Paso 2

Corta, con la sierra circular los 2 soportes laterales superiores, corta también en ángulo un lado de los soportes laterales para soldarlos, el ángulo es de 103°, cada soporte lateral es de 110 milímetros, como se muestra en la imagen de la izquierda.

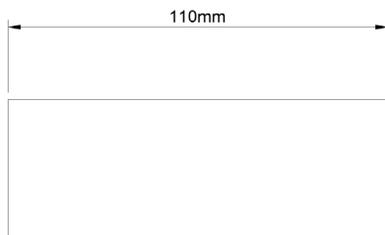

## Paso 3



Corta, con la sierra circular los 2 soportes laterales inferiores, corta también en ángulo un lado de los soportes laterales para soldarlos, el ángulo es de  $77^\circ$ , cada soporte lateral es de 225 milímetros, como se muestra en la imagen de la izquierda.



## Paso 4

Corta, con la sierra circular los 2 soportes verticales rectos, cada uno de 1300 milímetros, como se muestra en la imagen de la izquierda.



## Paso 5

Corta, con la sierra circular los 2 soportes verticales ángulos, cada uno de 1335 milímetros, como se muestra en la imagen de la izquierda.



## Paso 6

Suelda todo para que quede la estructura completa.



## Paso 7

Instala las materas en cada uno de los soportes con los tornillos.



## Paso 8

Pulir y pintar la tubería.

# Instrucciones de uso

## Paso 1

Llena las materas de tierra.

## Paso 2

Siembra semillas de tu preferencia.

## Paso 3

Es recomendable no usar líquidos de limpieza que contengan químicos corrosivos para evitar daños y desgaste, se pueden limpiar con agua y jabón.

## Proveedores

Los materiales para construir este producto de apoyo los puedes conseguir en tiendas de madera, ferreterías y en internet.

# PAID

Vive sin límites

Somos un equipo interdisciplinario que desarrolla productos de apoyo para mejorar la calidad de vida de las Personas con Discapacidad a través de procesos educativos en 10 municipios del departamento de Antioquia.

El diseño de los productos de apoyo se realizó de manera conjunta con las personas con Discapacidad, mediante una metodología de Rehabilitación Basada en Comunidad. Esta iniciativa fue liderada por la Universidad EIA, El Comité de Rehabilitación de Antioquia y Whee.